


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
USA
T +1 760.727.1280
F +1 760.734.4712
www.DJOGlobal.com

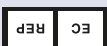

DONJOY[®]

DUOFORM⁺



1



2

2a




2c



3a



3b

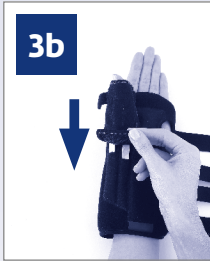

4



5



6



6



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

- Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de : Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION

- Entorses et traumatismes du poignet et du pouce.
- Immobilisation pré et post-opératoire du poignet et du pouce.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pomnade, lotion, gel ou de résidus gras similaires.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Desserrer les sangles et glisser la main dans l'attelle.
- Passer le pouce dans l'ouverture correspondante, en haut de l'attelle (gauche ou droite).
Remarque :
 - La seconde ouverture doit rester vide.
 - La main et le poignet doivent être maintenus entre les deux éclisses.
 - Si besoin, repositionner l'éclisse dorsale pour assurer une position correcte.
 - Toutes les éclisses sont malléables et peuvent être modelées au profil de la main.
- Si besoin d'immobiliser le pouce GAUCHE, déplacer l'éclisse de pouce de l'autre côté.
 - Détacher l'auto-agrippant. Retirer l'éclisse de pouce des encoches.
 - Insérer l'éclisse de pouce dans les encoches du côté gauche. Fixer l'auto-agrippant.
- Serrer d'abord la sangle du milieu, et la fixer à l'aide de l'auto-agrippant.
- Enrouler et fixer la sangle de pouce.
- Puis serrer les deux autres sangles de fermeture.

Ajuster le serrage des sangles en fonction de la compression et du confort souhaités.

Veiller à ce que la bordure de l'attelle avec les boucles recouvre le bord opposé.

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Aluminium, Polyester, Polyamide, Polyuréthane, PVC



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répare ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.