



**DONJOY**<sup>®</sup>

# FRANÇAIS

**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

## **UTILISATION / INDICATIONS**

- Lombalgie aiguë ou chronique; lombosciatique.

## **CONTRE-INDICATIONS**

- Aucune
- Pour une utilisation correcte, veillez à bien choisir la bonne taille et à serrer les sangles latérales selon vos besoins.

## **AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS**

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

## **INSTRUCTIONS D'APPLICATION**

- 1) Rentrez le ventre. Dégagez les sangles latérales élastiques pour qu'elles soient lâches. Placez la ceinture autour de la taille et fermez sur le devant (fermeture auto-agrippante).
- 2) Serrez les sangles latérales élastiques selon les besoins et fixez-les sur le devant à l'aide des attaches auto-agrippantes.

## **ENTRETIEN**

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

## **COMPOSITION**

Polyamide, Polyester, PVC, Gomme, Elasthane,, Acier



**MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.**

## **RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT**

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.**