



## FRANÇAIS

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance. L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

### UTILISATION/INDICATIONS

- Soutien et compression après une blessure aiguë et chronique au genou et une arthrose légère au genou
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par compression (pour un meilleur équilibre et pour faciliter les mouvements)
- Prévention des blessures
- Entorses ligamentaires légères à modérées (médiales et latérales)
- Instabilité et hypermobilité du genou légère à modérée
- Légère blessure du ménisque

### Caractéristiques de performance :

Procure une légère compression du membre ou du segment corporel grâce à une construction élastique.

Conçu pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique ou semi-rigide.

Protection légère d'un membre ou d'un segment du corps pour les soins aigus et prophylactiques.

### CONTRE-INDICATIONS

- Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être ajusté et porté qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.
- Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques
- Troubles de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré).
- Altération du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.

Le produit ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes et doit être retiré pendant les périodes de repos.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie du corps concernée pendant l'utilisation du dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

Manipulez avec soin : évitez d'attacher la fermeture de crochet de la sangle sur la partie tricotée, car elle peut endommager l'apparence du produit lorsque la sangle est retirée.

Note: Contactez le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

### INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE

- 1) Détachez et desserrez les deux sangles au niveau de la cuisse et du bas de la jambe sans les sortir des fentes.
  - 2) Saisissez les bords du support au niveau de la plus grande ouverture.
  - 2) Tirez le support sur la jambe jusqu'au genou.
  - 3) Ajustez le support si nécessaire.
- Assurez-vous que le coussin circulaire entoure la rotule et que les baleines bilatérales sont parallèles l'une par rapport à l'autre.
- 4) Serrez les sangles pour stabiliser confortablement le genou.
  - 5) Attachez les deux sangles.

Pour retirer les baleines bilatérales : Fig. 1-5

- 1) Détachez les bandes auto-agrippantes et retirez-les des baleines.
- 2) Sortez les baleines des poches par les fentes du support.

Remplacement des baleines bilatérales et des bandes : Fig. 6-13

- 1) Insérez les baleines dans les poches par les fentes du support.
- 2) Remettez les bandes auto-agrippantes sur les baleines bilatérales.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Retirer les baleines bilatérales avant le nettoyage. Lavable en machine en cycle délicat (max 40 ° C) avec un détergent doux.

Les sangles doivent être fermées pendant le lavage afin d'éviter tout dommage.

Ne pas utiliser d'eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

### COMPOSITION




Elasthane, Polyamide, Coton, Polyester, Polyoléfine, Mousse SBR, Polyuréthane, Polypropylène, Élastomer, Silicone, Acier



**NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL**

**GARANTIE DJO, LLC** réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.**

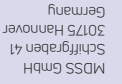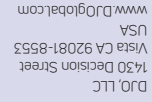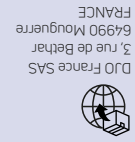

**DONJOY®**

**DonJoy GenuLax™**



**DONJOY®**

**DJO®**