

RAMASSAGE AU SOL

Sangles compatibles

NAUSICAA Médical vous propose deux types de sangles pour pouvoir effectuer un ramassage au sol :

- Sangles hamac (pages 15, 18)
- Sangles en U (pages 14, 16)



- Lors d'un ramassage au sol, il convient :
- De sécuriser la nuque du patient à l'aide d'une tête rigide ou d'une tête à attaches.
 - Si la sangle ne dispose pas de tête, il faut accompagner la nuque du patient.
 - La tête du patient doit être à l'opposé du mât évitant ainsi les chocs lors du levage.
 - Pour faciliter le passage des pieds du lève-personnes mobiles, ils doivent être écartés, le premier le long du corps et le second sous la plicature des deux genoux.

