

MODE D'EMPLOI INSTRUCTIONS DE CONDUITE SÉCURITÉ

Lisez cette documentation avant d'utiliser votre Eloflex pour une utilisation optimale et sans risque.

ELOFLEX H



ELOFLEX

MERCI D'AVOIR CHOISI ELOFLEX

Nous vous remercions d'avoir choisi un fauteuil Eloflex. Cela signifie beaucoup pour nous car nous avons pour objectif de simplifier la vie des personnes ayant des problèmes de mobilité. Nous espérons que votre Eloflex vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Nous vous invitons à lire cette documentation avant d'utiliser votre Eloflex. Nous vous suggérons également de tester votre Eloflex sur une surface lisse avec suffisamment d'espace autour de vous avant de l'utiliser dans d'autres conditions.

Le fauteuil roulant Eloflex est conçu pour différents types d'utilisateurs. Il est important de vérifier au préalable via votre revendeur et (ou) un médecin rééducateur spécialisé si Eloflex est adapté à vos besoins. Eloflex décline toute responsabilité si son fauteuil n'était pas adapté à vos besoins.

Un Eloflex sera principalement utilisé dans sa configuration standard. Si le fauteuil roulant électrique devait être adapté ou modifié de quelque façon, subir de mauvaises manipulations ou un mauvais entretien, la garantie ou la reprise ne serait pas valable.

**Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec votre Eloflex.
Conduisez prudemment !**



SOMMAIRE

Utilisation	3
Dépliage	4
Pliage	5
Installation de la manette	6
Instructions de charge	7
Conduite manuelle	7
Réglage des accoudoirs	8
Repose-pieds	8
Poignée	9
Système anti-bascule	9
Ceinture de sécurité	9
Réglage du support lombaire	10
Ajustement du dossier	10
Réglage du crochet de verrouillage	11
Transport et rangement	11
Manette de commande	12
Batteries	12
Comment retirer une batterie	13
Accessoires	13
Instructions de conduite	14
Consignes de sécurité	17
Caractéristiques techniques	20
Contact	20

UTILISATION

Classification et utilisation

Les fauteuils roulants Eloflex ont été conçus pour les personnes ayant des difficultés à marcher ou ne pouvant pas du tout marcher, mais dotées de la vue et, physiquement et mentalement, capables de conduire un fauteuil roulant électrique.

Les fauteuils Eloflex sont suffisamment compacts et maniables pour être utilisés autant en intérieur qu'en extérieur. Dans le chapitre "Caractéristiques techniques" vous trouverez des informations sur la vitesse, le rayon de braquage, la gamme, l'autonomie, le poids maximum de l'utilisateur, etc. Lisez également attentivement le chapitre «Consignes de sécurité».

Les fauteuils roulants Eloflex sont testés et approuvés selon la norme EN12184: 2014 - classe B (utilisation intérieure et extérieure). Eloflex est également approuvé selon la norme ISO-7176, IEC60601 et les batteries sont approuvées selon la norme UN38.3. Les fauteuils roulants électriques Eloflex répondent aux exigences applicables du MDR 2017/745.

L'évaluation de la conformité de classe 1 / le marquage CE a été délivré conformément à l'annexe VIII chapitre III du RIM 2017/745. Procédure d'évaluation de la conformité : Annexe II et Annexe III du RDM 2017/745. Le marquage CE sera annulé si vous utilisez des pièces de rechange ou des accessoires non approuvés pour ce produit.

Utilisateurs

Le but d'un fauteuil roulant électrique Eloflex est de compenser une blessure ou un handicap. Il est recommandé dans les cas suivants :

- Si l'utilisateur a l'incapacité, ou la capacité très restreinte de marcher, rendant difficile ses déplacements à domicile.
- S'il y a besoin, de sortir du domicile, de se rendre dans des lieux publics ou effectuer des tâches du quotidien.
- Lorsque l'utilisateur éprouve des difficultés à exercer une profession ou des activités en raison de son handicap.

Il est conseillé d'utiliser les fauteuils roulants électriques Eloflex, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Accessoires

A réception de votre fauteuil, vous trouverez un chargeur

et un sac avec quelques outils pour l'entretien du fauteuil dans le sacochette de rangement sous le siège.

Convivialité

Utilisez uniquement le fauteuil roulant électrique Eloflex en parfait état de fonctionnement pour ne pas mettre en danger qui que ce soit. Voici une liste exhaustive des situations qui peuvent affecter l'utilisation de votre fauteuil roulant électrique.

- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si les batteries sont défectueuses ou abîmées.
- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si les moteurs fonctionnent de manière erratique ou font un bruit anormal.
- N'utilisez pas le fauteuil roulant électrique si les freins ne semblent pas fonctionner normalement.
- Si vous constatez que la ceinture de sécurité, l'accoudoir, le siège, le dossier, le joystick ou à toute autre partie du fauteuil est abîmée, contactez votre centre d'assistance ou votre revendeur.
- Si vous remarquez des dommages au système électrique (câbles, batteries, chargeurs) contactez votre centre de service ou votre revendeur.

Garantie

Vous disposez d'une garantie de deux ans sur votre fauteuil roulant électrique Eloflex (conditions de garantie conformes aux lois applicables sur les dispositifs médicaux en vigueur). Conditions de garantie détaillées sur www.eloflex.fr. **Pensez à bien garder le carton d'emballage d'origine pendant toute la durée de garantie.**

Durée de vie

La durée de vie moyenne d'un Eloflex est d'environ 5 ans. Cette durée peut évoluer suivant la façon dont est utilisé Eloflex. Elle peut-être beaucoup plus longue si son utilisation est conforme aux recommandations de cette notice.


Sécurité et risques

LISEZ LES INSTRUCTIONS DE CONDUITE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PAGE 14 AVANT D'UTILISER VOTRE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE ELOFLEX.



Dépliage

1. Redressez le fauteuil plié et dépliez le repose-pieds (Photo 1).
2. Saisissez la poignée à l'arrière du dossier et tirez vers l'arrière. En même temps, maintenez d'une main le coussin de siège (Photo 2).
3. Fermez le loquet de verrouillage (Photo 3).
4. Dépliez les systèmes anti-bascule en appuyant sur le bouton, puis en faisant pivoter le dispositif anti-bascule (Photo 4).
5. Soulevez les accoudoirs à la hauteur souhaitée (Photo 5).

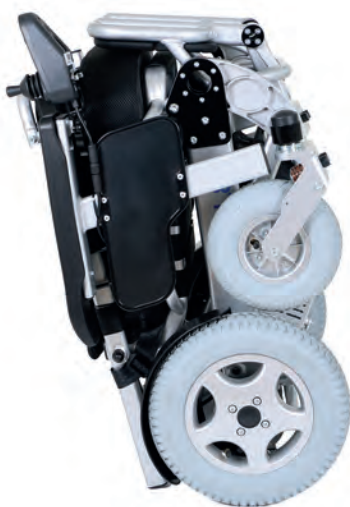

IMPORTANT

Il est très important de fermer le crochet de verrouillage avant l'utilisation du fauteuil.



Pliage

1. Abaissez les accoudoirs (Photo 1).


2. Repliez les dispositifs anti-bascule en appuyant sur le bouton puis en les faisant pivoter vers l'intérieur. (Photo 2).

3. Ouvrez le loquet (Photo 3).

4. Saisissez la poignée à l'arrière du dossier et appuyez vers l'avant. En même temps, maintenez d'une main le coussin de siège (Photo 4).

5. Repliez le repose-pied (Photo 5).

En savoir +...
sur le réglage des accoudoirs
page 8.

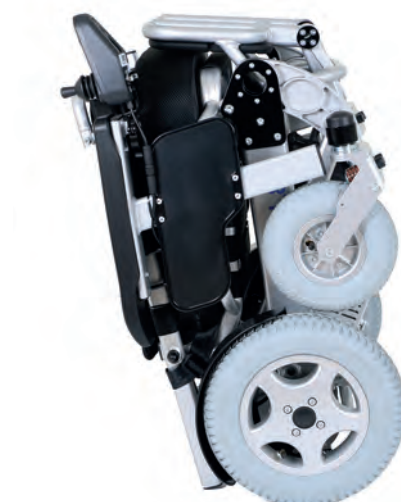

Installation de la manette

Etape 1

Montez la manette dans le support sous l'accoudoir et serrez la vis.



Etape 2

Assemblez les connecteurs de câble et faites-les tourner doucement jusqu'à ce que les broches entrent dans les trous et que les rainures des deux connecteurs s'enclenchent. Puis vissez les manches ensemble à chaque contact les uns avec les autres.



IMPORTANT

Veillez à ce que les broches du connecteur ne soient pas endommagées

Baisser la manette

La conception intelligente de la manette permet à l'utilisateur d'abaisser rapidement la manette sans l'enlever. Vous pouvez vous rapprocher davantage du bord de la table et ainsi avoir une meilleure position assise lorsque vous mangez.

1. Soulevez le levier de verrouillage pour libérer la manette.
2. Tirez doucement la manette vers l'avant.



Instructions de charge

Commencez par éteindre votre Eloflex (toutes les lumières de la manette doivent être éteintes). Connectez le chargeur à la prise située à l'avant de la manette. Assurez-vous que la position des contacts est la même. Branchez ensuite le câble d'alimentation du chargeur sur une prise murale.

Le chargement est indiqué par un voyant sur le chargeur. Le voyant rouge signifie que la charge est en cours. Après environ 5 h, les batteries sont chargées à 90%. Le fauteuil peut être utilisé à nouveau.

Au bout de 8 h environ, le voyant du chargeur devient vert et les batteries sont complètement chargées.

Si vous constatez que le chargeur est chaud pendant cette opération ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal.

Pour une durée de vie maximale de la batterie, la charge doit durer environ 5 h lorsque la barre de l'indicateur de batterie situé sur la manette est au tiers (lorsque 3 des voyants sont verts). Les batteries ne seront pas endommagées par les recharges,



mais pour une durée de vie maximale, nous vous recommandons de débrancher le chargeur lorsque les batteries sont pleines.

Le chargement des batteries peut être effectué jusqu'à -10 degrés.

Lors du chargement à basses températures les batteries ne sont pas complètement chargées. Si votre Eloflex est utilisé à des températures inférieures le kilométrage peut en être affecté. Par exemple à -10 degrés le kilométrage peut diminuer jusqu'à 50%.



IMPORTANT
NE JAMAIS connecter le chargeur directement à la batterie.

Conduite manuelle

Si vous souhaitez faire rouler le fauteuil manuellement sans les moteurs, poussez les deux leviers rouges des moteurs (voir photo) pour déconnecter les freins magnétiques (position de débrayage).

A noter : si vous utilisez le fauteuil en mode électrique les leviers doivent être en position connecté (embrayage).



Réglage des accoudoirs

Pour un confort d'assise optimal, vous pouvez régler la hauteur des accoudoirs.

Voici comment :

1. Déverrouillez d'abord le verrou en soulevant le levier de verrouillage.
2. Ensuite, montez ou baissez les accoudoirs à la hauteur souhaitée.
3. Rabattez le levier de verrouillage.



CONSEIL !

Il est également possible de retirer complètement les accoudoirs pour faciliter l'entrée et la sortie.

Repose-pieds

Pour faciliter l'entrée et la sortie, le repose-pieds peut être replié comme ci-dessous.



Poignée

La poignée de conduite sert à faire rouler le fauteuil manuellement. Elle peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Systeme anti-bascule

Vous pouvez replier les dispositifs anti-bascule lors du pliage du fauteuil et pendant le transport.

1. Appuyez sur le bouton
2. Repliez le dispositif anti-bascule.

REMARQUE ! Les dispositifs anti-bascule doivent toujours être dépliés lors de l'utilisation du fauteuil.



Ceinture de sécurité

Pour une conduite en toute sécurité, nous vous recommandons de toujours utiliser la ceinture de sécurité lorsque vous conduisez.



Réglage de support lombaire

Le modèle H est équipé d'un support lombaire pratique pour un confort d'assise optimal.

Pour ajuster le support lombaire, procédez comme suit.

- 1.** Soulevez le tissu à l'avant du fauteuil.
- 2.** Desserrez ou serrez le support lombaire à l'aide de la fermeture velcro sur le support souhaité.
- 3.** Si vous ne voulez pas de soutien lombaire retirez tout.



Ajustement du dossier

Pour ajuster la tension du tissu de dossier, soulevez le rabat du dossier arrière en tirant dessus.

Serrez légèrement les sangles pour une position d'assise plus ferme.

Rabattez le rabat du dossier arrière et remettez le dans sa position initiale.



Réglage du crochet de verrouillage

Il est important de verrouiller votre crochet Eloflex correctement. Il doit être bien à la verticale comme sur la photo ci-contre. Il doit pouvoir être enclenché peu importe la position des ressorts. Pour serrer d'avantage l'inertie du crochet il suffit juste de serrer les deux vis hexagonales qui le maintiennent en place.



Il est important de verrouiller le crochet lorsque vous êtes assis autrement le dossier risque de se plier.



Transport et rangement

- Pour soulever le fauteuil, il est recommandé d'abord de le plier, puis de le mettre debout. Vous trouverez des conseils sur les façons de charger l'Eloflex dans une voiture sur <https://eloflex.fr/astuces-pour-charger-eloflex/>
- Le fauteuil plié peut être rangé dans le coffre d'une voiture ou dans un placard.
- Si vous n'utilisez pas votre fauteuil pendant un certain temps, rechargez les batteries avant de les retirer.
- **Le fauteuil doit être stocké à l'intérieur dans un endroit sec, ventilé et hors-gel** (entre 0 et 30 degrés).



Les batteries de l'Eloflex H ne sont pas autorisées pour le transport aérien



Manette de commande



Prise USB

CONSEIL :

À l'aide de la prise USB située sous la manette, vous pouvez charger votre téléphone portable.



1 Niveau de batterie : indique le niveau de charge. Lorsque les batteries sont pleines toutes les lumières sont allumées. Mettez en charge lorsque les deux tiers des lumières sont éteintes.

2 Indicateur de vitesse : toutes les lumières allumées = vitesse maximale.




Manette :

contrôle la vitesse et la direction du fauteuil.




Allumer et éteindre :

appuyez pour allumer et éteindre votre Eloflex.

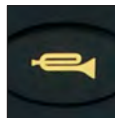

Klaxon :

Appuyez pour prévenir.

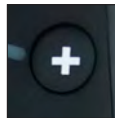

Augmenter la vitesse :

appuyez pour augmenter la vitesse du fauteuil.




Réduire la vitesse :

appuyez pour réduire la vitesse du fauteuil.

Batteries

Votre fauteuil est livré avec 2 batteries. Vous pouvez si vous le souhaitez équiper votre fauteuil d'une 3^{ème} batterie (sur commande) et ainsi gagner encore plus d'autonomie. L'emplacement est prévu pour cela à l'arrière du fauteuil.

Les batteries supplémentaires peuvent être commandées chez votre revendeur ou directement chez nous par mail : info@eloflex.fr ou au 09 67 66 51 29

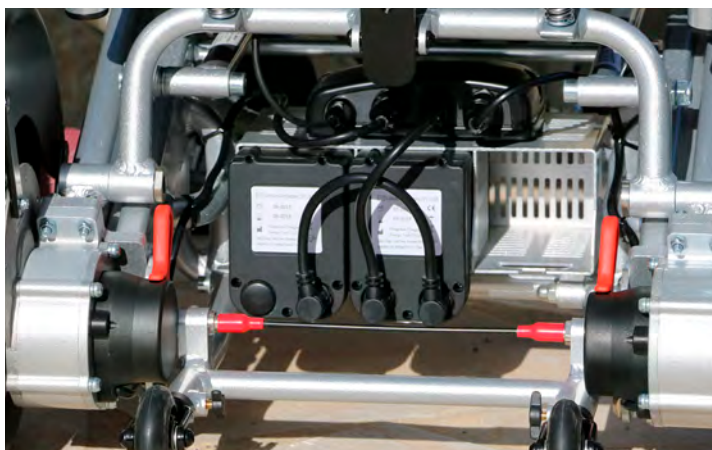

Comment retirer une batterie



Etape 1

Dévissez la bague de verrouillage en bas du connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement desserrée.



Etape 2

Retirez délicatement la fiche jusqu'à ce qu'elle se détache complètement de la batterie.



Etape 3

Passer votre main sous la batterie et posez vos doigts sur la pince (voir photo ci-dessus). Pressez et retirez doucement la batterie.



Etape 4

Tirez la batterie vers vous jusqu'à ce qu'elle se détache complètement de son support. Rangez soigneusement la batterie.



Etape 5

Sur le dessous de la batterie, il y a un clip qui la maintient en place dans son support. Pour libérer la batterie, la pince doit être enfoncée.



Etape 6

Vous pouvez rouler avec une seule batterie sans aucun problème. Gardez juste à l'esprit que le kilométrage sera alors divisé par deux.

Accessoires

**Retrouvez tous nos accessoires chez votre revendeur
ou sur : eloflex.fr**

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE

Il existe des risques de blessure ou de chute pour les personnes en fauteuil roulant.

- Ne pas dépasser la pente maximale autorisée.
- Toujours utiliser le dispositif anti-bascule lorsque vous roulez avec Eloflex.
- La conduite en pente doit toujours être en vitesse réduite.
- Évitez les surfaces extrêmement glissantes.
- Ne jamais tenter de monter ou descendre des escaliers avec votre fauteuil électrique.
- Ne jamais franchir des obstacles plus élevés que la hauteur maximale recommandée.
- Évitez les mouvements rapides ou saccadés avec la manette et les changements brusques de direction pendant la conduite.

Risque d'être bloqué en zones éloignées.

- Un utilisateur avec une mobilité très limitée ne doit pas tenter de voyager seul.

Risque de blessure aux pieds si ceux-ci glissent sous le repose-pieds lors de la conduite.

- Placez toujours vos pieds au milieu du repose-pieds (au centre de la palette) en conduisant.

Risque de blessure si vous passez dans des endroits trop étroits.

- Conduisez dans des passages étroits à vitesse réduite et avec la plus grande attention.

Il y a un risque de chute si le système anti-bascule est mis trop haut, est endommagé ou est monté autrement que l'installation standard.


- Le dispositif anti-bascule doit toujours être monté lorsque le fauteuil roulant est utilisé.
- Le dispositif anti-bascule ne fonctionne que sur la terre ferme. Sur un sol mou comme l'herbe et la neige il perd de son efficacité. Par conséquent, conduire avec une grande prudence sur sols instables.



Notez que ces symboles sont très importants.
Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque
d'accident ou de dégâts sur votre Eloflex.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Lire

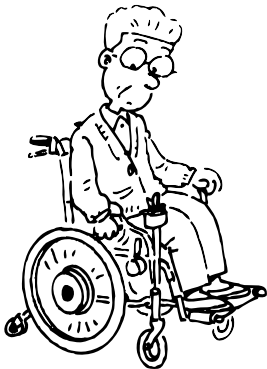

L'utilisateur doit lire les consignes de sécurité et de conduite avant l'utilisation du fauteuil Eloflex.

Pratique




- Pour une parfaite **pratique** commencez par vous exercer dans un lieu spacieux, plat, de préférence à l'extérieur, avant d'utiliser votre fauteuil roulant électrique dans les magasins, les restaurants ou autres.
- **Avancez** en déplaçant la manette vers l'avant lentement.
- **Arrêt** en libérant la manette.

Marche arrière




- Vous pouvez effectuer une **marche arrière** en tirant lentement la manette vers l'arrière. Pour arrêter, relâchez la manette. Regardez toujours derrière vous avant de reculer afin de ne rien heurter.

Tourner

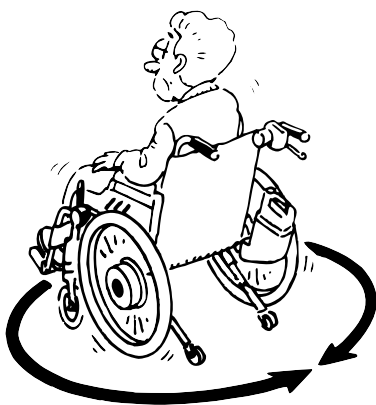


- **Tournez** en déplaçant la manette doucement sur le côté. Faites attention que rien ne se trouve sur votre droite ou votre gauche lorsque vous tournez.

Virage

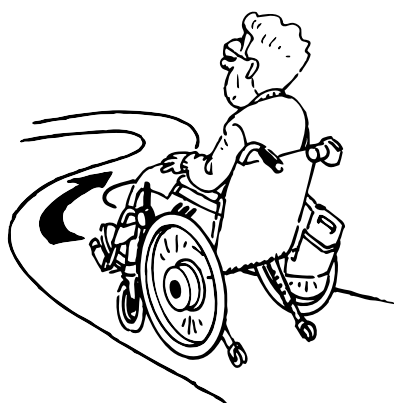

- **Pour tourner**, déplacez doucement la manette d'un côté à l'autre en suivant la direction dans laquelle vous voulez tourner. Réduisez toujours votre vitesse dans les virages.


Obstacles

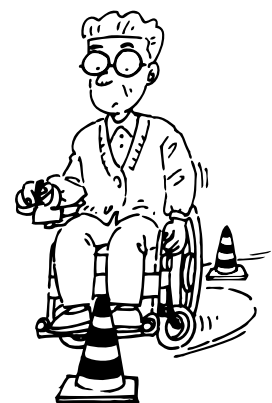

- Pour éviter un obstacle, déplacez doucement la manette de gauche à droite (ou de droite à gauche). Rappelez-vous de réduire votre vitesse à l'approche d'un obstacle.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Accélérer

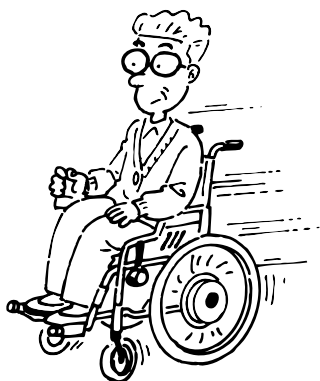


- Pour **accélérer** poussez la manette vers l'avant. Pensez à réduire la vitesse chaque fois que vous vous sentez incertain, que vous devez tourner ou que vous vous approchez d'un obstacle.

Marche




- Pour **passer une marche** conduisez lentement et assurez vous que les roues soient bien dans le sens de la marche. Puis poussez la manette vers l'avant lentement pendant que vous vous penchez doucement vers l'arrière. La marche (ou le trottoir) ne doit pas dépasser 6 cm de haut.

Conduite en pente

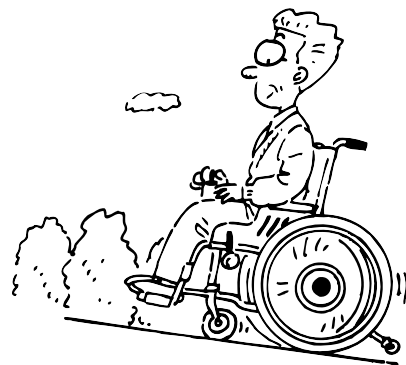


- Pour **conduire en pente** restez en position droite. Évitez de faire des virages si possible. Penchez-vous légèrement vers l'avant en pente ou vers l'arrière en descente afin de maintenir la plus grande stabilité. Conduisez toujours lentement en pente. Nous recommandons d'éviter les surfaces inclinées de plus de 9 degrés.

Prendre l'ascenseur

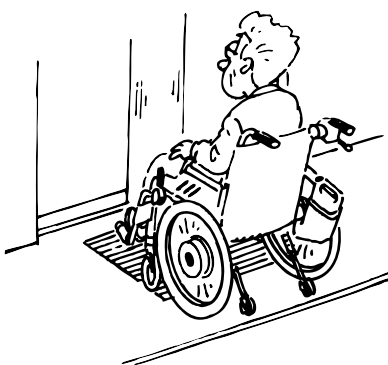


- **Avant de monter dans un ascenseur** vérifiez la largeur de la porte et sa vitesse de fermeture. Gardez à l'esprit que vous pouvez être amené à faire marche arrière ou demi-tour dans l'ascenseur.

Conduite sur route

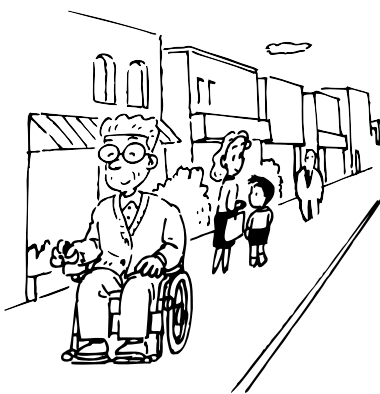

- **Conduisez principalement** sur les trottoirs, les allées ou les pistes cyclables.

Passages cloutés

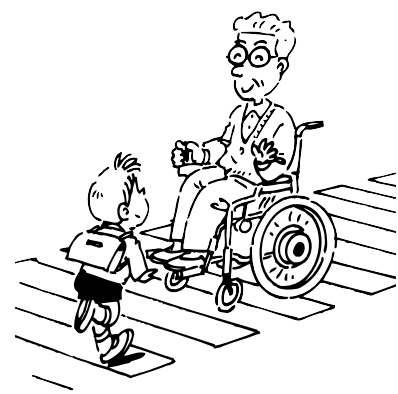

- Faites attention aux voitures. Pour traverser utilisez les **passages cloutés**. Descendez du trottoir par la partie biseautée s'il y en a une. Évitez les trottoirs de plus de 6 cm.

SÉCURITÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est utilisé à des fins autres que celles décrites dans le présent document.

- Utiliser le fauteuil roulant électrique seulement selon ce manuel (voir ci-dessus, chapitre "Instructions de conduite»)

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est utilisé par un utilisateur aux facultés très affaiblies.

- Ne pas utiliser le fauteuil roulant lorsque votre capacité de conduire est altérée en raison, par exemple, de la maladie, la drogue ou l'alcool.

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est accidentellement mis en route.

- Eteindre le fauteuil roulant avant l'entrée ou la sortie, ou si quelque chose est susceptible de heurter la manette de contrôle.
- Lorsque les moteurs sont débrayés les freins ne fonctionnent pas. Par conséquent, le fauteuil ne peut rouler que sur des surfaces planes, jamais en pente. Ne restez jamais sur le fauteuil roulant ou à proximité en pente avec des moteurs découplés.

Il existe des risques de blessures si le fauteuil roulant est débranché accidentellement.

- Relâchez la manette lors du freinage d'urgence. Le fauteuil roulant s'arrêtera automatiquement.

Il existe des risques de blessures si l'on tombe du fauteuil roulant.

- Ne glissez pas vers l'avant. Ne vous pliez pas en deux. Ne vous penchez pas au-dessus du dossier, par exemple pour atteindre quelque chose.
- Bouclez toujours la ceinture de sécurité avant chaque départ.

- Si vous souhaitez vous installer dans un autre siège, mettez les deux fauteuils le plus près possibles l'un de l'autre.

Il existe des risques de blessures si le poids maximal autorisé est dépassé.

- Respecter le poids maximal autorisé (voir chapitre "Caractéristiques techniques" au dos de ce document).
- Ne jamais utiliser le fauteuil roulant pour le transport de plus d'une personne à la fois.

Il y a risque de blessures corporelles et dommages du fauteuil roulant si le crochet de verrouillage n'est pas enclenché correctement lors de l'utilisation du fauteuil motorisé.

- Si crochet de verrouillage n'est pas enclenché correctement, le fauteuil peut soudainement se replier lorsqu'il est utilisé et entraîner votre chute.
- Assurez-vous que le crochet de verrouillage est dans la bonne position avant utilisation du fauteuil.

Il y a un risque de blessures et d'écrasements pendant le pliage du fauteuil roulant.

- Toujours plier le fauteuil comme décrit dans le manuel.
- Veillez à ce que personne ne soit piégé lors du pliage ou du dépliage.

Il y a risque de blessures corporelles et dommages du fauteuil roulant en cas d'utilisation en zones humides.


- Le fauteuil roulant ne doit pas être utilisé lors de la douche.
- Le fauteuil roulant ne doit pas être utilisé pour la baignade.



Notez que ces symboles sont très importants. Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque d'accident ou de dégâts sur votre Eloflex.

SÉCURITÉ


Traverser une voie ferrée

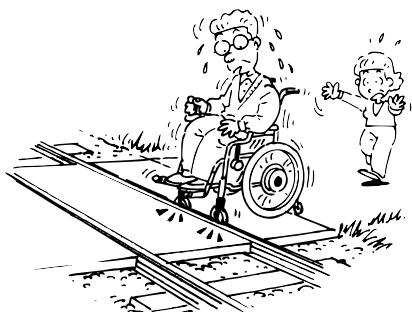

- **Pour traverser les voies de chemin de fer** mettez-vous toujours droit, jamais de biais. Ne traversez jamais une voie ferrée seul, faites vous accompagner.




Pente chute

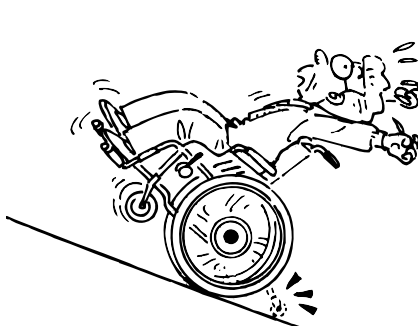

- Soyez prudent si vous conduisez sur une pente raide (plus de 9 degrés) le fauteuil risque de se retourner.



Marches hautes

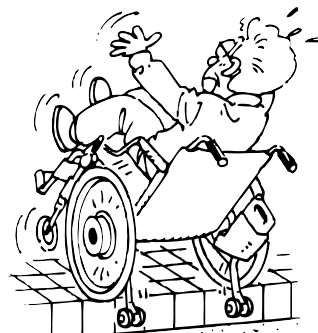

- Soyez prudent lors du passage de marches hautes. Nous vous déconseillons les obstacles supérieurs à 6 cm.




Transfert



- Nous recommandons de vous faire aider lors du transfert de votre Eloflex vers un autre support. Tout d'abord coupez l'alimentation. Soulevez toujours l'accoudoir et le repose-pieds avant de sortir ou entrer dans votre fauteuil.



Faire soi-même

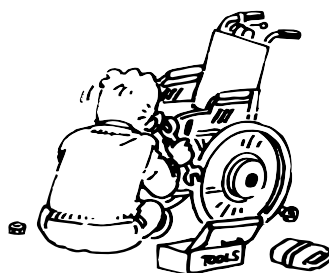

- **Ne jamais essayer de réparer** votre fauteuil roulant électrique défectueux ou **d'apporter des modifications par vous même.** Contacter Eloflex.



Ce n'est pas un jouet




- Ne jamais laisser les enfants s'asseoir ou utiliser votre Eloflex.



SÉCURITÉ

Nettoyage

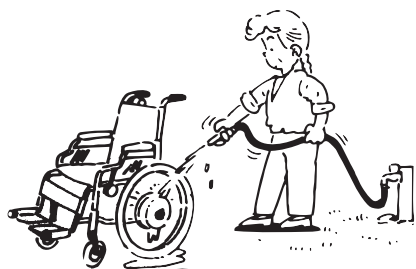

- Ne nettoyez jamais votre Eloflex à grande eau. Nettoyez le uniquement avec un chiffon humide. Notez qu'un Eloflex ne doit jamais être lubrifié.




Attention à la chaleur



- Ne laissez jamais votre Eloflex en plein soleil ou près d'une source de chaleur cela pourrait endommager les batteries. Ne pas rester près d'un feu avec votre Eloflex.




Rangement

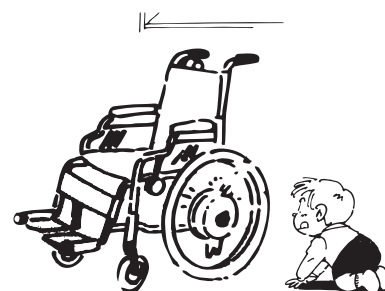

- Gardez votre Eloflex hors de la portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Rangez-le toujours dans un endroit sec et ventilé.



Chargeur

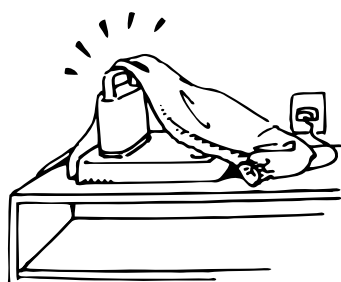

- Le chargeur ne doit jamais être recouvert lorsqu'il est en charge. Il risque de chauffer et de causer un accident ou de blesser quelqu'un.



Batterie



- Ne laissez jamais les batteries en plein soleil ou dans un endroit dont la température est inférieure à zéro. Elles doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ELOFLEX H
Poids avec batteries	38 kg
Poids sans batteries	31,4 kg
Vitesse	8 km/h
Autonomie	40 km avec un(e) utilisateur(rice) de 100 kg 27 km avec un(e) utilisateur(rice) de 200 kg
Temps de chargement	5 heures par charge
Moteurs	2x moteurs brushless haute puissance
Puissance	2 x 400 Watt
Batteries	2x batteries Lithium Ion 20 Ah / 24 V (480 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie
Poids une batterie	3,2 kg
Rayon de braquage	99 cm
Pente maximale	12 degrés
Roues	9" avant (pleines) / 13" arrière (pneumatiques)
Pression pneus	2,5 kg (recommandé)
Hauteur du siège	54 cm
Largeur d'assise	51 cm
Profondeur d'assise	51 cm
Poids utilisateur	Max 200 kg
Manette	Rabattable, amovible (droite, gauche, dossier*)
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable en machine
Dossier	Tissu de dossier réglable en tension
Repose-pieds	Rabattable
Dimensions (cm)	103 cm (H) x 66 cm (L) x 115 cm (P)
Dimensions plié (cm)	83 cm (H) x 66 cm (L) x 45 cm (P)
Garantie	2 ans

Batteries non autorisées pour le transport aérien. Possibilité de commander notre kit batterie pour l'avion en supplément.

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire



© Copyright Eloflex

Ce document contient des informations protégées par le droit d'auteur et ne peut être partiellement ou totalement copié ou reproduit sans l'autorisation écrite d'Eloflex. Eloflex se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit. Informations non contractuelles.

Contactez Eloflex

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez avant tout votre revendeur.

Si vous cherchez des informations consultez notre FAQ sur notre site internet www.eloflex.fr vous y trouverez certainement la réponse à votre question.

