

# Fauteuil coquille ELYSEE



Le fauteuil ELYSEE **e**, grâce à sa télécommande 2 boutons, permet à l'utilisateur de conserver son autonomie. Usage intérieur/extérieur.

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits).

**Votre fauteuil ELYSEE **e** est équipé de série d'une assise en mousse à mémoire de forme de Classe II, d'un harnais et d'un cale-tête.**

L'ELYSEE **e** est un **produit exclusif** sur le marché, D.M. agréé par le CERAH

## Caractéristiques

- **Autonomie électrique du patient - inclinaison 100% électrique** : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.
- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Sécurité** : revêtement PVC/PU non feu M2.
- **Assise en mousse à mémoire de forme de Classe II**
- **Coloris** : 3 types de revêtements disponibles.  
**PVC/PU** : Cacao, Ebène, Framboise – **Velours déperlant** : Choco Edition, Black Edition – **Tissus Chiné** : Gris Chiné ou Marron Chiné
- **5 Largeurs d'assise** : 32 cm, 38 cm, 44 cm, 50 cm et 56 cm.
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : 67 cm (T1, T4, T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13)
- **3 Options disponibles** : Tablette ventrale & Cale tronc ajustable (droit/gauche) – **Kit Batterie**
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré monté franco à l'unité
- **Fabrication Française**
- Poids du fauteuil : environ 38 kg
- **Garanties** :
  - Fauteuil : 2 ans
  - Vérin : 5 ans

### **Télécommande :**

Télécommande verrouillable

Appuyer 15 secondes sur les deux boutons

blanc et vert = La télécommande est verrouillée

Appuyer à nouveau 3 secondes sur les deux boutons blanc et vert =

La télécommande est déverrouillée

Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE

électrique avant/arrière, permettant de gérer soi-même son inclinaison.

**Bouton Blanc :** Avant

**Bouton Vert :** Arrière



### **Aide à l'entretien :**

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le. Remplacer le revêtement si nécessaire.

### **Caractéristiques techniques :**

<b>Largeur d'assise</b>	<b>Profondeur d'assise</b>	<b>Largeur hors tout</b>	<b>Hauteur assise</b>	<b>Hauteur hors-tous</b>	<b>Poids du fauteuil</b>	<b>Poids maxi utilisateur</b>
						
320 mm 380 mm 440 mm 500 mm 560 mm	460 mm 480 mm 500 mm	670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
<b>Normes non feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible</b>						
<b>Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible</b>						
Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg						

# Fauteuil coquille ELYSEE



Le châssis roulant ELYSEE est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant.

Usage intérieur/extérieur.

Son repose-jambes à crémaillère propose 6 positions réglables indépendamment de l'inclinaison du fauteuil. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits).

**Votre fauteuil ELYSEE est équipé de série d'une assise en mousse à mémoire de forme de Classe II, d'un harnais et d'un cale-tête.**

L'ELYSEE est un **produit exclusif** sur le marché, de DM agréé par le CERAH

## Caractéristiques :

- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Sécurité** : revêtement PVC/PU non feu M2.
- **Assise en mousse à mémoire de forme de Classe II**
- **Coloris** : 3 types de revêtements disponibles  
**PVC/PU** : Cacao, Ebène, Framboise – **Velours déperlant** : Choco Edition, Black Edition -  
**Tissu chiné** : Gris Chiné ou Marron Chiné
- **5 Largeurs d'assise** : 32 cm, 38 cm, 44 cm, 50 cm et 56 cm.
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : 67 cm (T1, T4, T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13)
- **2 Options disponibles** :  
Tablette ventrale & Cale tronc ajustable (droit/gauche)
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré monté franco à l'unité.
- **Fabrication Française**
- Poids du fauteuil : environ 38 kg
- **Garantie** : 2 ans

## Aide à l'entretien :

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le. Remplacer le revêtement si nécessaire.

## Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tous	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
						
320 mm 380 mm 440 mm 500 mm 560 mm	460 mm 480 mm 500 mm	670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
<b>Normes non feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible</b>						
<b>Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible</b>						
Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg						

