



Upgrade your wheelchair

Yomper+



Notre secret : une position centrale unique

Démarrez-le et découvrez de **nouvelles expériences**. Avec ou sans le moteur allumé, le **Yomper** se fait **complètement oublier**. La roue motrice est fixe, ne rajoute aucun frottement et reste **toujours** dans la **meilleure position de déplacement**.

Les avantages qui font la différence



Un usage intuitif et rassurant

Une technologie fiable pour une **conduite sûre**. Propulsez-vous **sans efforts** sur de longues distances et dans des lieux auparavant inaccessibles.

Vraiment discret, le Yomper est compatible avec la majorité des fauteuils rigides ou pliables.



Adaptez votre conduite

Votre besoin change, le Yomper+ s'adapte : 2 modes, intérieur et extérieur. 5 vitesses par mode.



Une commande EasyGo pratique !

Goûtez à une conduite **dynamique**, attachée au fauteuil ou à la cuisse, la télécommande EasyGo est votre meilleure amie pour un quotidien **sans efforts**.



Installez-le très facilement

Ses 2 petites roues à l'avant le rendent stable et permettent de le mettre en place sans effort. La poignée est surélevée pour une installation optimale.

La roue motrice Yomper+

Poignée

La poignée est surélevée pour une installation depuis votre siège (voiture, lit etc.)

Bouton de mise en tension

Batterie Lithium-ion

- Avec témoin de charge
- Garantie 2 ans



Connecteur commande Tierce personne

Moteur 250W

Confortable et facile à remplacer

Roue avant

Les 2 petites roues à l'avant rendent le Yomper stable et permettent de le mettre en place sans effort

La télécommande EasyGo

Écran OLED

- Niveau de batterie
- Affichage des paramètres

Batterie rechargeable USB



Connexion Bluetooth sans fil

Bouton de vitesse +/-

- 5 vitesses réglables en mode intérieur
- 5 vitesses réglables en mode extérieur

5 LED

Affichage de la vitesse sélectionnée et du mode intérieur (vert) ou extérieur (rouge)

2 clics pour démarrer 1 pour arrêter



Comment utiliser le Yomper +

Le Yomper+ s'adapte aux différentes situations à l'aide de son système de commande EasyGo. Grâce à lui, vous pouvez choisir le mode intérieur ou extérieur et la vitesse, même en roulant.

Le boîtier de commande est dit mécanique et une simple pression de la main suffit à propulser le fauteuil. Un double appui bref permet la mise en route du Yomper+ tandis qu'un appui prolongé permet le changement de mode.

Il est prévu trois paramètres personnalisables pour rendre l'utilisation du Yomper confortable et sûre: son accélération, les 5 vitesses par mode, sensibilité d'arrêt, la vitesse peut être modifiée n'importe quand, en roulant.

	Je démarre	Je choisis la vitesse	Je m'arrête*
Mode intérieur et extérieur (5 vitesses paramétrables)	J'appuie 2 fois sur le bouton	Avec le sélecteur de vitesse +/-	J'appuie sur le bouton <small>*(en mode intérieur l'arrêt peut se faire avec les mains courantes)</small>

Indications générales

Poids utilisateurs max.	Max. 150 kg
Pente maximale	Jusqu'à 16%
Garantie	2 ans hors pièces d'usure
Compatibilité	Fauteuil à châssis rigide Fauteuil à châssis pliant

Roue motrice

Puissance du moteur	250 W
5 paliers d'accélération	Réglable via le boîtier
5 paliers de résistance mains courantes	Réglable via le boîtier
5 vitesses intérieur 5 extérieur	Personnalisable 0 à 10 km/h <i>(directement via le boîtier de commande)</i>

Batterie



Batteries de série	24V6Ah lithium-ion
Autonomie	23 km (160Wh) 35 Km (240Wh)
Étanche, sans entretien, se recharge en 4h, garantie de 24 mois, conforme à la réglementation des transports aériens (cabine)	

Poids

Yomper+	5,8 kg
Télécommande EasyGo	87 g
Poids sans batterie	4,65kg

Options

Variateur tierce personne	
Batterie haute capacité	24V240Wh Lithium-ion (+350g) <i>Autonomie de 35 km</i>

